

PRIVAT OCH KONFIDENTIELL FB/100 MÅTDIAGRAM

Kund: _____

Datume: _____

viktigt: Det är viktigt att de mätningar du registrerar är så exakta som möjligt. En hög grad av omsorg och uppmärksamhet måste ägnas åt denna uppgift. Ta god tid på dig och upprepa mätproceduren tills du är säker på att du registrerar konsekventa och korrekta värden.

Dessa bälten är av nitad konstruktion och är inte justerbara. Medan små fel inte är svåra att rätta till, kommer större fel alltid att medföra högre kostnader. Ett vanligt måttband av tyg eller plast av den typ som används för klädtillverkning är bäst för att ta måtten. Du bör sträva efter en tight snarare än en lös passform, eftersom erfarenheten visar att en tight passform är mycket bekvämare och säkrare än en lös.

Bäraren bör stå upprätt med fötterna ungefär 60 cm från varandra och händerna placerade på baksidan av huvudet medan alla mått tas. **Detta bälte är utformat för att passa runt midjan och kan inte bäras på höfterna som vissa moderiktiga jeans, byxor och kjolar. Den viktigaste referenspunkten för alla mått är midjebandets nederkant**, så det är av avgörande betydelse att det mäts för att passa **midjan**.

För personer med en fylligare eller midjelös figur kommer bältet endast att vara säkert om midjebandet är mindre än höftomkretsen. Måttet **M** bör användas för att avgöra detta, och graden av obehag som blir följd. **Alla mått måste tas intill huden.**

Ange centimetrar eller tum.

Beskrivning		Centimeter / tum
A	Midja normal	A =
B	Midjekontroll (ta ett djupt andetag och dra in för att göra den så liten som möjligt)	B =
C	Framifrån midjan ner mellan benen till början av blygdläpparna	C =
D	Framifrån midjan ner mellan benen till slutet av blygdläpparna	D =
E	Framifrån midjan ner till klitoris	E =
I	Midjan fram mellan benen till anus	I =
J	Waist front between legs and buttocks to rear waist	J =
K	Midja fram mellan benen och över skinkorna till bakre midjan	Vänster =
		Höger =
L	Midjan bakre delen mellan skinkorna och anus	L =
M	Midjemått med 2,5 cm brett bälte.	M =
N	Höftens omkrets	N =
P	Höjd	P =

Viktiga anmärkningar angående mått Vänligen läs innan du börjar mäta.

1. Fäst ett 2,5 cm brett bälte runt midjan och se till att det är horisontellt och inte nedfällt framtill. Gör en markering (markering 1) mitt fram på den person som ska mätas i nivå med bältets undersida. (Beroende på anatomi kan detta vara ovanför, under eller på naveln).
2. Justera bältet till den minsta omkrets där du känner att du kan bära det och markera positionen på bältet. Låt inte att nöja dig med en skön och bekväm passform, utan sträva efter en tight snarare än en lös passform.
3. Gör en markering (markering 2) mitt på ryggen i nivå med bältets undersida.
4. Gör markeringar (markering 3 & 4) 7,5 cm på var sida om markering 2, också i nivå med bältets undersida.

MÄTNINGAR

C. Mät från markering 1 till början av blygdläpparna.

D. Mät från markering 1 till slutet av blygdläpparna.

E. Mät från markering 1 till klitoris.

I. Mät från markering 1 mellan benen till anus, håll dig så rak som möjligt. Detta är ett mycket viktigt mått för noggrannhetens skull är det värt att upprepa flera gånger. Användaren måste ha en upprätt position under denna procedur.

J. Från markering 1, mät från bältet mellan benen och över skinkorna till markering 3. Upprepa denna procedur till markering 4. Denna andra mätning bör vanligtvis vara densamma och fungerar som dubbelkontroll. Se till att måttbandet ligger platt och ligger an mot huden hela vägen, så direkt som möjligt. Var försiktig med dessa mätningar.

K. Med bältet på plats mäter du mellan benen från markering 1 till markering 2. Se till att tejpen sitter tätt upp mellan skinkorna.

L. Mät från markering 2 mellan skinkorna till anus.

M. Ta av bältet, lägg ut det platt och mät från änden till referensmarkeringen för att bestämma längden. Midjebandet kommer att tillverkas efter detta mått. A och B används för att ge en jämförande kontroll.

Jag intygar att dessa mått är korrekta. **Signerat:** _____

BESTÄLLNINGSGRANS

YTTERLIGARE BESTÄLLNINGSGRANSINFORMATION

Artiklar som ofta köps med kvinnliga bälten:

- Lårband
- Ytterligare D-ringar
- NP/100 (analproppar)
- NPS/100 (Vaginalproppar)

Antal	Kod	Produktbeskrivning	Pris	Subtotal
SUB TOTALT =				
TRANSPORT =				
TOTALT =				
INLÅNING =				
BALANS =				